



منبع نور LED کمپانی استرایکر مدل L9000

پنل جلویی

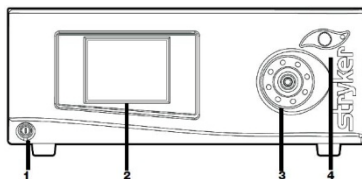

۱. دکمه پاور
۲. صفحه لمسی
۳. کلمپ کابل: محل اتصال کابل نور سرد
۴. گیره باز کننده کلمپ: باز کننده کلمپ نگه دارنده کابل نور قبل از اتصال کابل نور سرد.

پنل پشتی

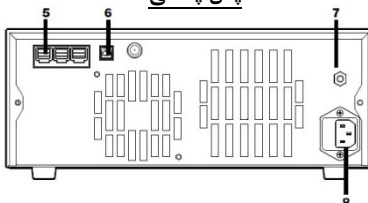


۵. کانکتور SFB: جهت اتصال با سایر تجهیزات استرایکر
۶. پورت SIDNE: جهت اتصال به سیستم اتاق عملهای یکپارچه استرایکر
۷. اتصال زمین


۸. کانکتور برق AC: جهت اتصال به برق AC

۹. کانکتور SFB: جهت اتصال با سایر تجهیزات استرایکر

نحوه اتصال کابل نور سرد به دستگاه

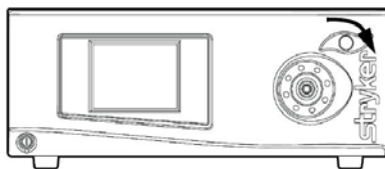

۱. گیره باز کننده کلمپ را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا متوقف گردد. در این حالت کلمپ نگه دارنده کابل نور باز می شود.

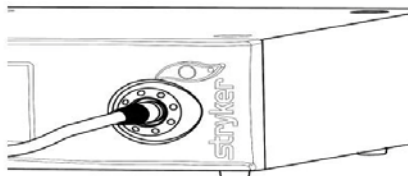

۲. انتهای کابل نور سرد را به درون کلمپ وارد کنید تا ضامن عمل کرده و کابل را محکم نگه دارد.
۳. دقت نمایید کابل نور سرد حتماً غیر رسانا و تمیز و خشک باشد.
۴. برای جدا کردن کابل نور سرد از دستگاه گیره را مجدداً در جهت عقربه های ساعت بچرخانید تا کلمپ باز و کابل نور آزاد گردد.

- **اخطار:** انگشت خود را از داخل پورت و کلمپ نگه دارنده دور نگه دارید.
- **اخطار:** هرگز دریچه های تهویه روی پنل دستگاه را نپوشانید.
- **اخطار:** هرگز به نور ساطع شده از دستگاه در انتهای کابل نور سرد مستقیماً نگاه نکنید. شدت نور ممکن است باعث آسیب چشمان شما گردد.