


کمراهد STRYKER مدل 1288HD

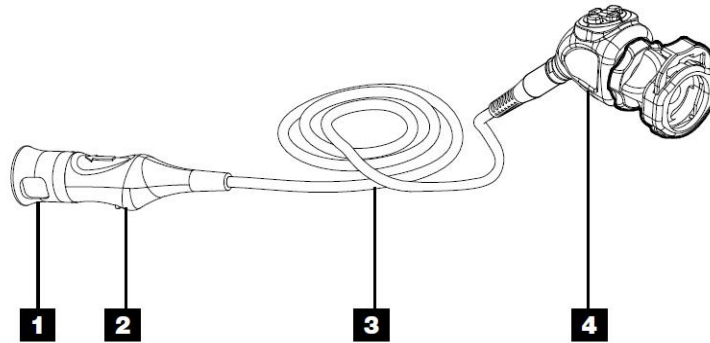


۱. درپوش ضد آب: این درپوش از سوکتهای محل اتصال به کنسول در برابر رطوبت در زمان شستشو و ضدعفونی محافظت می نماید

۲. کابل اتصال: با استفاده از این پورت کمرا هد به کنسول کمرا متصل می گردد.

۳. کابل کمرا

۴. کمراهد: این وسیله تصاویر را دریافت و برای کنسول کمرا ارسال می کند. کمرا هد همچنین محل قرار گرفتن دکمه های کنترل و اتصال کوپلر برای فوکوس تصویر، می باشد.

کوپلر

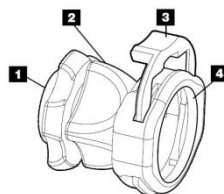


۱. محل اتصال به کمرا هد

۲. حلقه فوکوس

۳. کلمپ برای محکم نگاه داشتن لنز در داخل کوپلر


۴. محل قرار دادن EYEPIECE لنز

نحوه اتصال کوپلر به کمراهد

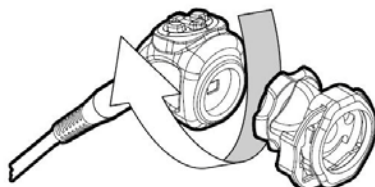


- برای باز کردن یا بستن کوپلر روی کمرا حتما کوپلر را از محل اتصال به کمرا (قسمت ۱) گرفته و از چرخاندن و ایراد فشار به سایر قسمت های کوپلر خودداری فرمایید. برای بستن کوپلر روی کمرا هد، آن را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید.

نحوه اتصال لنز به کمراهد

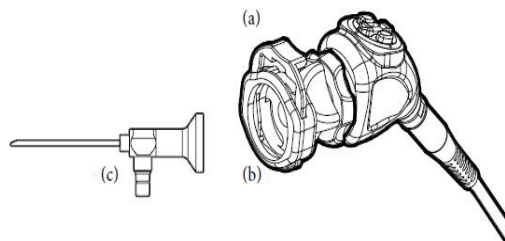

- برای ورود لنز ابتدا کلمپ a را به پایین فشار داده و eyepiece لنز را در قسمت b قرار دهید و سپس کلمپ را رها نمایید.

نحوه اتصال کمرا هد به کنسول کمرا

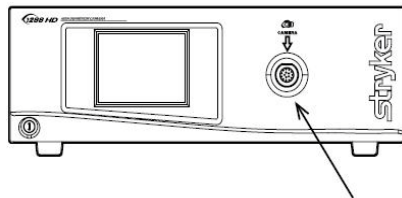

- درپوش محافظ آب را باز کرده و فلش آبی رنگ روی کمرا هد را روبروی فلش مشخص شده روی کنسول قرار داده و کمرا را به کنسول متصل نمایید.

استفاده از دکمه های روی کمرا هد



- **W**: طبق تنظیمات کمپانی با نگه داشتن این دکمه به مدت ۲ ثانیه عمل white balance انجام می شود.

- **Zoom**: با استفاده از این دو دکمه می توانید طبق تنظیم دلخواه خود، نور یا زوم تصویر را زیاد یا کم نمایید.

- **P**: این دکمه برای کنترل دستگاههای اینتگریشن و ملحقات سیستم لاپاروسکوپی از روی کمراهد طراحی شده است.

اخطار: از تا کردن و ایراد فشار به کابل کمرا جدا خودداری فرمایید و دقت فرمایید کمرا و کابل آن را در مجاورت اشیا تیز و برنده قرار نداشته باشد.

اخطار: کمرای 1288HD قابل اتوکلاو نبوده و از اتوکلاو آن با بخار جدا خودداری فرمایید. استفاده از کاور کمرا یا محلول های ضد عفونی مناسب ترین راه برای استفاده از کمرای 1288HD می باشد.